

 <p>TC Sağlık Bakanlığı ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ</p>	ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZI KULLANIM TALİMATI			
Doküman No: İST.TL.05	Yayın Tarihi: 10.12.2009	Revizyon Tarihi: 30.09.2015	Revizyon No:02	Sayfa No: 01

1. AMAÇ

Şeker ölçüm cihazı bakım ve kullanım yöntemini belirlemeyi amaçlamaktadır.

2. KAPSAM

Şeker ölçüm cihazı kullanımını sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Acil Yardım İstasyonu Çalışanları ve Ekip Sorumluları sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

- 6.1. Cihaz açma kapama düğmesi kullanılarak açılmalıdır.
- 6.2. Cihazın açma işlemini tamamlayıp ekranda strip görüntüsünün çıkması beklenmelidir.
- 6.3. Cihaza uygun strip takılmalıdır.
- 6.4. Hastanın uygun parmağı alkol ile silinip lanset ile delinmelidir.
- 6.5. Strip üzerine kan damlatılarak sonucun çıkması beklenmelidir.
- 6.6. Strip tıbbi atık kutusuna atılarak cihaz kapalı konumuna getirilmelidir.
- 6.7. Cihaz kalibrasyonu kullanım kılavuzuna uygun şekilde periyodik olarak yapılmalıdır.
- 6.8. Cihaz, nöbet değişimlerinde ekip tarafından kontrol edilmelidir.
- 6.9. Cihaza uygun strip takılmalıdır.
- 6.10. Cihaz kullanımdan sonra kapalı konumunda tutulmalıdır.
- 6.11. Cihaz nemli ortamdaki uzak tutulmalıdır.
- 6.12. Cihazda periyodik kalibrasyon ya da kullanım sırasında, şüpheli sonuç veya ölçüm hataları tespit edildiğinde, kalibrasyon ve bakım hizmeti için Ekip Sorumlusu tarafından KKM'nin bilgisi dahilinde Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi ile iletişime geçilmelidir.
- 6.13. Test sonuçları Şeker Ölçüm Cihazı Kontrol (Şeker ölçüm cihazı kalibrasyon kontrolü ayda en az 2 kere yapılmalıdır) Test Sonuçları Kayıt Formu (İST.FR.03) na kayıt edilmelidir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 7.1 Şeker Ölçüm Cihazı Kontrol Test Sonuçları Kayıt Formu (İST.FR.03)