

 <p>ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞKANLIĞI</p>	<b>ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ SIRT TAHTASI (SPİNE BOARD) BAKIM VE KULLANIM TALİMATI</b>			
Doküman No: İST.TL.06	Yayın Tarihi: 15.12.2009	Revizyon Tarihi: 30.09..2015	Revizyon No:02	Sayfa No:1/2

## 1. AMAÇ

Sırt Tahtasının (Spine Board) bakım ve kullanım yöntemini belirlemek.

## 2. KAPSAM

Sırt Tahtası (Spine Board) kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini kapsar.

## 3. KISALTMALAR

## 4. TANIMLAR

## 5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Acil Yardım İstasyonu Çalışanları ve Ekip Sorumluları,

## 6. FAALİYET AKIŞI

**6.1.** Ekip sorumlusu tarafından sırt tahtası kullanımı gerektiğine ( travma vakalarında vb.) karar verilmelidir. Hasta kesinlikle yürütülmemelidir.

**6.2.** Hastaya boyunluk takılmalıdır. (Bkz. Boyunluk kullanma talimatı (İST.TL.13)

**6.3.** Sırt tahtası hastanın yanına konulmalıdır.

**6.4.** Hasta sırt tahtasının olduğu taraftan omurgası sabit tutulacak şekilde (kütük manevrası) tüm ekip tarafından yan çevrilmelidir.

**6.5.** Pozisyon olarak ortaya denk gelen ekip personeli tarafından sırt tahtası hastanın altına kaydırılmalıdır.

**6.6.** Hasta omurgası sabit tutulacak şekilde yavaşça sırt tahtasına yerleştirilmelidir.

**6.7.** Hasta sırt tahtası kemerleri ile sabitlenmelidir.

**6.8.** Baş sabitleyici aparat başın iki yanına yerleştirilerek baş sabitlenmelidir.

**6.9.** Tüm ekip tarafından sırt tahtası çevrelenerek tutulmalıdır.

**6.10.** Ekip sorumlusunun komutu ile aynı anda kaldırılmalıdır.

**6.11.** Ana sedyeye yavaşça yerleştirilmelidir.

**6.12.** Ana sedye kemerleri ile ikinci kez sabitlenmelidir.

**6.13.** Ana Sedye Kullanma Talimatına (İST.TL.02) uygun olarak ambulansa yerleştirilmelidir.

**6.14.** Transport tamamlandığında hasta ana sedye ile acil servise alınmalıdır.

**6.15.** Ana sedye, üzerinde sırt tahtası olan hastane sedyesi ile paralel bitişik hale getirilmelidir.

**6.16.** Sırt tahtasının kemerleri ekip sorumlusunun belirlediği yandan tek taraflı olarak açılmalıdır.

 <p>TC Sağlık Bakanlığı ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ</p>	<b>ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ SIRT TAHTASI (SPİNE BOARD) BAKIM VE KULLANIM TALİMATI</b>			
Doküman No: İST.TL.06	Yayın Tarihi: 15.12.2009	Revizyon Tarihi: 30.09..2015	Revizyon No:02	Sayfa No:2/2

**6.17.** Hasta omurgası sabit tutulacak şekilde (kütük manevrası) tüm ekip tarafından yan çevrilmelidir.

**6.18.** Ambulans sırt tahtası pozisyon olarak ortaya denk gelen ekip personeli tarafından hastanın altından alınır, hastanın yan pozisyonu korunmalıdır.

**6.19.** Hastane sırt tahtası hastane personelinin yardımıyla hastanın altına yerleştirilmelidir.

**6.20.** Hasta sırt tahtası kemerleri ile sabitlenmelidir.

**6.21.** Hasta ekip sorumlusunun komutu ile aynı anda kaldırılarak hastane sedyesine yerleştirilmelidir.

**6.22.** Hastane sedye kemerleri ile ikinci kez sabitlenmelidir.

**6.23.** Hastane personeline teslim edilmelidir.

**6.24.** Spine Board(Sırt Tahtası) taşıyabileceği ağırlıktan fazlası (160 kg kadar) yüklenmemelidir.

**6.25.** Hasta sedyeye emniyet kemerleri ile mutlaka sabitlenmelidir.

**6.26.** Sistem arızalı olduğu tespit edildiğinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

**6.27.** Sırt Tahtasının (Spine Board) bakım ve temizliği Ambulans ve Tıbbi Malzeme Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatına (İST.TL.30) göre yapılmalıdır.

**6.28.** Sırt Tahtasının arızalı olduğu durumlarda Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimine bilgi verilmelidir.

## **7. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

**7.1.** Ana Sedye Kullanma Talimatı (İST.TL.02)

**7.2.** Ambulans ve Tıbbi Malzeme Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatı (İST.TL.30)

**7.3.** Boyunluk Kullanma Talimatı (İST.TL.13)