



ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ
ŞİŞME ve VAKUM ATEL
BAKIM VE KULLANIM TALİMATI

Doküman No:
İST.TL.07

Yayın Tarihi:
22.12.2009

Revizyon Tarihi:
30.09.2015

Revizyon No:02

Sayfa No: 1 / 2

1. AMAÇ

Şişme atel bakım ve kullanım yöntemini belirlemeyi amaçlar.

2. KAPSAM

Şişme atel kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Acil Yardım İstasyonu Çalışanları ve Ekip Sorumluları, sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1 ŞİŞME ATEL

6.1.1 Atel uygulama öncesi, ekstremitenin uç noktasından duyu ve nabız muayenesi yapılmalıdır.

6.1.2. Atel uygularken, kırık bölgenin altındaki ve üstündeki eklemler de içine alınacak şekilde takılmalıdır.

6.1.3. Atel takıldıktan sonra şişirilerek, eklemler ve kırık bölge sabitlenmelidir.

6.1.4. Atel uygulandıktan sonra, duyu ve nabız muayenesi tekrarlanmalı ve atel uygulaması duyu ve nabız engellemeyecek şekilde yapılmalıdır.

6.1.5. Şişme atel kullanım talimatı, acil yardım istasyon elemanları tarafından tam olarak öğrenilmelidir ve istasyon sorumlusu tarafından denetlenmelidir.

6.1.6.Şişme atelin nöbetçi ekip tarafından çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir.

6.1.7.Şişme atel pompası çalışır durumda olmalıdır.

6.1.8. Şişme atelin uygulama sırasında kolayca zarar görebileceği akılda tutulmalıdır.

6.2. BAKIM VE TEMİZLİĞİ

6.2.1. Şişme atelin arızalı olduğu tespit edildiğinde kesinlikle kullanılmamalıdır. Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimine bilgi verilmelidir.



ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ
ŞİŞME ve VAKUM ATEL
BAKIM VE KULLANIM TALİMATI

Doküman No:
İST.TL.07

Yayın Tarihi:
22.12.2009

Revizyon Tarihi:
30.09.2015

Revizyon No:02

Sayfa No: 2 / 2

6.2.2. Şişme atel kullanımdan sonra, bakım ve temizliği Ambulans ve Tıbbi Malzeme Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatına (İST. TL.30) göre yapılır.

7.1.VAKUM ATEL

7.1. Vakum kol ve bacak atelleri, yaralı uzuvların hareketsiz kalması gerektiği durumlarda sabitleme ve hareketsiz tutma maksadıyla kullanılmaktadır. Yaralı bacak veya kol havalandırılmış atele yerleştirildikten sonrası atel şekillendirilmeli ve sonra vakumla sabitlenmelidir.

7.2. BAKIM VE TEMİZLİĞİ

7.2.1. Vakum atel kullanımdan sonra, bakım ve temizliği Ambulans ve Tıbbi Malzeme Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatına (İST. TL.30) göre yapılır.

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

8.1. Ambulans ve Tıbbi Malzeme Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatı (İST. TL.30)