 TC Sağlık Bakanlığı ANKARA 112 AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ	ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ SANDALYE / ÇOK AMAÇLI / KOMBİNASYON SEDYE BAKIM VE KULLANIM TALİMATI			
Doküman No: İST.TL.09	Yayın Tarihi: 21.12.2009	Revizyon Tarihi: 30.09.2015	Revizyon No:02	Sayfa No: 1 / 2

1. AMAÇ

Kombinasyon sedyenin bakım ve kullanım yöntemini belirlemeyi amaçlar.

2. KAPSAM

Kombinasyon sedyenin kullanımını, dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Acil Yardım İstasyonu Çalışanları ve Ekip Sorumluları, sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Hasta şikayetine bakılmaksızın yürütülmemelidir. Kombinasyon sedye kullanımı hastanın kliniğine göre ekip sorumlusu tarafından tercih edilebilir.

6.2. Sedye sandalye konumuna getirilmelidir. Altaki kanca takılarak sabitlenmelidir.

6.3. Hastanın baş ve ayakuçlarına geçilir, teskereci metodu ile sandalye sedyeye geçirilmelidir.

6.4. Sedyenin emniyet kemerlerinin her üçü de bağlanarak hastanın tespiti sağlanmalıdır.

6.5. Uygulayıcılardan biri, sandalye sedyenin sırt tarafından tutarak kendine doğru çekmelidir.

6.6. Diğer uygulayıcı serbest kalan ayak kısmını tutmalıdır.

6.7. Uygulayıcılar komutla ve koordineli hareketlerle sandalye sedyenin kaldırılmasını sağlamalıdır.


6.8. Merdivenlerden indirme esnasında, hastanın ayak kısımları aşağı gelecek ve yüzü indiği yöne bakacak şekilde transportu sağlanmalıdır. Merdivenden çıkarma sırasında başı yukarı gittiği yönün tersine bakacak şekilde taşınmalıdır.

6.9. Ana sedyeye ulaşana kadar kemerler takılı taşınır, ana sedyeye transfer sırasında emniyet kemerleri açılmalıdır.

6.10. Ana sedyeye transportu yapılırken baş, gövde ve ayaklar korunmalıdır.

6.11. Ana sedyeye transportu sırasında ana sedye kullanma talimatına göre hareket edilmelidir.

6.12. Emniyet kemerlerinin kullanılmasına kesinlikle dikkat edilmelidir.

 <p>TC Sağlık Bakanlığı ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ</p>	ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ SANDALYE / ÇOK AMAÇLI / KOMBİNASYON SEDYE BAKIM VE KULLANIM TALİMATI			
Doküman No: İST.TL.09	Yayın Tarihi: 21.12.2009	Revizyon Tarihi: 30.09.2015	Revizyon No:02	Sayfa No: 2 / 2

6.13. Taşıma sırasında komutlara dikkat edilerek koordineli bir şekilde hareket edilmelidir.

6.14. Sedyenin taşıma kapasitesi 160 kg'dır ve üzerine çıkılmamalıdır. Arıza durumlarında Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimine bilgi verilmelidir.

6.15. Ambulans Ve Tıbbi Malzeme Temizlik Ve Dezenfeksiyon Talimatında (İST.TL.30) öngörülen standartlarda yapılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. Ambulans Ve Tıbbi Malzeme Temizlik Ve Dezenfeksiyon Talimatı (İST.TL.30)