

# r17a

## İnteraktif Oyun Odyometresi

### Genel Ayarlar



# General setting


**R17A** ile son kullanıcı test sonuçlarının nasıl görüntüleneceği, hangi vericilerin kullanılabilceği, bluetooth ile veri transferi ve daha fazlasını kendisine göre ayarlayabilir. Tarih de aynı zamanda güncellenmelidir.





Başlangıç sayfasında ilgili ikona basarak seçenekler basitçe ayarlanabilir.



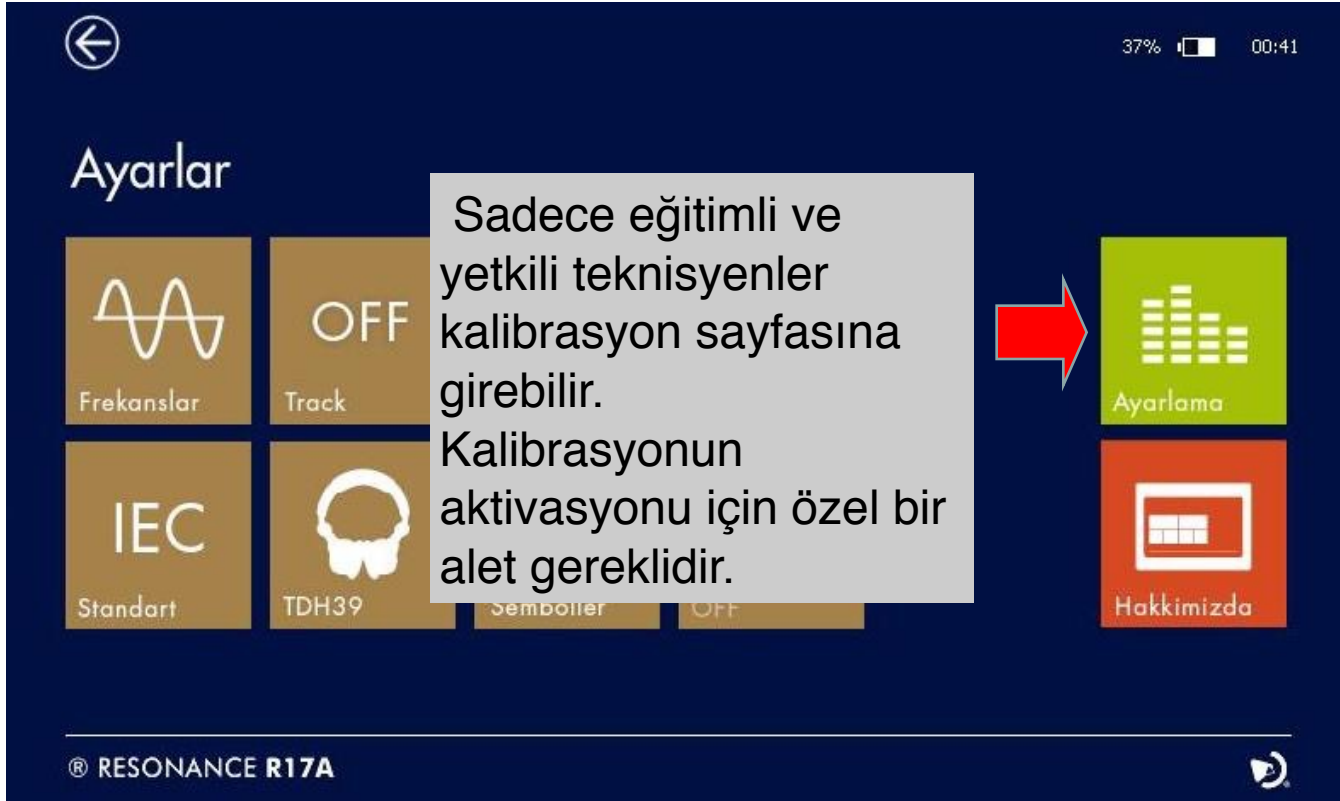


Ayarlar sayfası görünümü.



# Değiştirilebilir Seçenekler



Bu menüye girerek operatör test için kullanılacak frekansları aktif/pasif yapabilir (1000Hz hariç) Bu ayarlar RE-Play testini etkilemeyecektir.

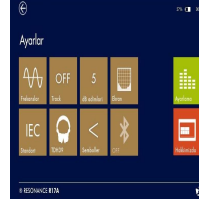

Bu düğme iki kanal birbirine bağlar. AÇIK olduğunda, kanal 1' deki ses seviyesi artırıldığında kanal 2'deki de aynı oranda artar.



Bu menüye girerek operatör testleri Avrupa normlarına göre EC 60645-1 or ANSI (S3.6) yapabilir. Sadece US için ANSI tavsiye edilir.



Bu menüye girerek operatör kullanılan başlık tipini seçebilir: TDH39, HDA280, EAR3A. Ayarı değiştirmek için düğmeye 5sn boyunca basınız.



# Değiştirilebilir Seçenekler



Bu menüye girerek operatör her iki kanaldaki ses artış adımlarını seçebilir (1dB, 2dB, 5dB).



Operatör Ton Odyometrisi esnasında odyogramın nasıl görüneceğini seçebilir:

-farklı frekanslarda verici limitlerinin görünümü.

- farklı şiddetteki kayıplar için gri bölmeler.  
-Konuşma muzunun görünümü.



Bu menüye girerek operatör Ton veya Konuşma odyogramı için işaretleme sembolünü seçebilir(Ton veya Konuşma) bu Kemik Vibratörünü belirler.



Bu menüye girerek operatör Bluetooth ve MDS yazılımı için data transferini aktif edebilir.



## Deđiřtirilebilir Seenekler



Bu menüye girerek operatör cihaza ait bilgileri alabilir. Yazılım sürümü, üretici ve teknik destek bilgileri.

Bu sayfayı açarak, cihaz otomatik kontrol yapar. Kontrol sırasında cihaz güvenilirliği için ana fonksiyonlar test edilir. Sonuçlar OK veya HATA olarak gösterilir.



Yeni ayarları kaydetmek ve ana başlangıç sayfasına dönmek için, sol üstteki ikona basınız.





Tarih ve saat görünümü.





**Testi yapmadan önce, RESONANCE USB belleğindeki pdf formatındaki operatör kılavuzunu okuyunuz.**

Cihazın seri numarasını gösteren etikete hiçbir şekilde zarar vermeyiniz.



**Herhangi bir şüphe durumunda,  
lütfen cihazı kullanmayın ve  
DUYUMED İşitme Cihazları A.Ş.  
ile irtibata geçiniz.**

RESONANCE cihazını tercih ettiğiniz için  
teşekkürler.

